

機械器具(58) 整形用機械器具  
一般医療機器 歯科用インプラント手術器具 70965001  
ストッパー ドリル フル キット

**【禁忌・禁止】**

併用医療機器

- ・当社以外の製品と併用しないこと。

使用方法

- ・本製品のハンドピース取り付けは、本品を確実に置くまで挿入し、固定されていることを確認すること。[器具の破損や脱落につながる恐れがある。]
- ・変形や破損した場合は使用しないこと。[器具の破損や不適切な設定による術後成績不良が発生する恐れがある。]

\* **【形状・構造及び原理等】**

- ・形状・構造



1. Stopper Drill



2. Parallel Pin



3. MF Path Pin



4. Final Drill



5. Drill Extension



6. Hand-piece Adapter



7. Ratchet Adapter



8. Hex Driver



9. Torque Wrench



10. Depth Gauge



**【使用目的又は効果】**

- ・本品は歯科用インプラントの外科手術に使用する。再使用可能である。

**【原材料】**

ステンレス鋼

**【使用方法等】**

- ・本品は非滅菌品であるため、必要に応じて使用前に本品を滅菌すること。  
推奨滅菌方法: 高圧蒸気滅菌  
温度: 121℃ 30分

**【使用上の注意】**

- ・本品の使用に際しては、歯科技術に熟練し、かつ製品特性や手術手技を十分に理解した歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・本品は、記載の使用目的以外には使用しないこと。
- ・本品の使用後は、付着している血液、組織などが乾燥しないように直ちに洗浄液などに浸漬すること。
- ・本品は、汚染又は腐食したインスツルメントと一緒に保管しないこと。

**【保管方法及び有効期間等】**

- ・本品は、乾燥したサージカルトレーで保管すること。
- ・本品は、感染の恐れがある場所に保管しないこと。

**【保守・点検に係る事項】**

- ・本品の使用後は、できるだけ早く血液、組織などの異物を除去し、院内感染防止のために洗浄・消毒すること。
- ・汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- ・洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げすすぎは、精製水や注射用水など品質の特定できる水を使用すること。
- ・洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
- ・使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲り等に異常がないか点検すること。
- ・点検後、高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)を行うこと。
- ・強アルカリ、強酸性の洗浄液や消毒液は、本品を腐食させる恐れがあるので、使用を避けること。また、金属たわし、クレンザー等は、本品の表面が損傷するので使用しないこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

\*\* 製造販売業者: 株式会社BMS JAPAN  
TEL: 03 (5817) 8189

製造業者: Dentium Co., Ltd  
国名: 大韓民国