

機械器具(58) 整形用機械器具  
一般医療機器 歯科用インプラント手術器具 70965001

再使用禁止

デジタル ガイド Anchor

**【禁忌・禁止】**

併用医療機器

- ・当社以外の製品と併用しないこと。
- ・再使用禁止

製造業者: Dentium Co., Ltd

国名: 大韓民国

**【形状・構造及び原理等】**

・形状・構造

1. アンカーピン



2. アンカースクリュー



・原理

1. アンカーピンまたは、アンカースクリューを差し込み Surgical Guide を固定させることができる。

**【原材料】**

チタン合金

**【使用目的又は効果】**

本品は歯科用インプラントの外科手術に用いる器具である。また、本品は単回使用である。

**【使用方法等】**

1. 患者の口腔内に製作しておいた Surgical Guide を配置する。
2. 適合度確認後、アンカーピンまたは、アンカースクリューを用いて、Surgical Guide を固定する。

・本品は未滅菌品であり、使用前には必ず高圧蒸気滅菌を行うこと。  
推奨滅菌条件: 121°C、30分

**【使用上の注意】**

- ・本品は、記載の使用目的以外には使用しないこと。
- ・包装が開封又は破損している場合は使用しないこと。

**【保管方法及び有効期間等】**

1. 常温・常湿で、直射日光を避け、清潔な場所に保管すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

\* 製造販売業者: 株式会社BMS JAPAN

TEL: 03 (5817) 8189